

Коммерческое предложение

06.09.2026

**Опромінювач настінний
ОБН-75М бактерицидний
безозоновий**

Артикул: 5998-1

Цена: 545.00 грн



Облучатель бактерицидный настенный ОБН-75М 1х30 Вт (з БЕЗОЗОНОВОЮ лампою TUV-30В).

Укомплектований СЕРТИФІКОВАНОЮ БЕЗОЗОНОВОЮ бактерицидною лампою TUV-30В. Сертифікат відповідності UA.056.П.00399-25 виданий Полтавастандартметрологія.

Опромінювач безозоновий бактерицидний 1-ламповий ОБН-75М укомплектований БЕЗОЗОНОВОЮ бактерицидною лампою TUV-30В, що не виділяє озону. НЕ ПОТРІБНЕ провітрювання приміщення після роботи опромінювача з безозоновою лампою. **Встановлюється на стіну або стелю для регулярного використання - відомого, як процедура кварцування приміщень.**

Опромінювач ОБН-75М бактерицидний призначено для дезінфекції повітря і поверхні приміщень лікарень, клінік, лабораторій, лікувально-профілактичних, виробничих і громадських установ. Є ефективним засобом профілактики та боротьби з інфекціями, що передаються повітряним шляхом. Опромінювачі бактерицидні ОБН, ОББ і ОБП, це один із видів медичного обладнання, призначених для дезінфекції. За допомогою бактерицидних опромінювачів забезпечують дезінфекцію та знезараження повітря і поверхонь приміщення. Під час роботи **кварцового опромінювача ОБН-75 М** випромінюються короткохвильові промені ультрафіолетового (UV-C) випромінювання з довжиною хвилі 253,7 нм, які мають бактерицидну дію. Необхідно зазначити, що **опромінювачі ОБН-75** не використовують для знезараження і стерилізації медичних інструментів, медичного одягу, постільної білизни та інших виробів. Під час роботи опромінювача бактерицидного забороняється присутність людей і тварин у приміщенні без спеціальних засобів захисту.

Ви можете **купити бактерицидний опромінювач ОБН-75**, самостійно розрахувавши кількість для Вашого приміщення, залежно від продуктивності опромінювача (м3/год), категорії приміщення і режиму опромінення:

***КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ:**

I. Операційні, передопераційні, пологові, стерильні зони ЦСО, дитячі палати пологових будинків, палати для недоношених і травмованих дітей. Бактерицидна ефективність, Jбк: 99,9%.

II. Перев'язувальні, кімнати стерилізації та пастеризації грудного молока, палати і відділення імуноослаблених хворих, палати реанімаційних відділень, приміщення нестерильних зон ЦСО, бактеріологічні та вірусологічні лабораторії, станції переливання крові, фармацевтичні цехи з виготовлення стерильних лікарських форм. Бактерицидна ефективність, Жбк: 99%.

III. Палати, кабінети та ін. приміщення ЛПЗ, які не включені до категорій I і II. Бактерицидна ефективність, Жбк: 95%.

IV. Дитячі ігрові кімнати, шкільні класи, побутові приміщення промислових і громадських будівель з великим скупченням людей при тривалому перебуванні. Бактерицидна ефективність, Жбк: 90%.

* на 1 лампу TUV 30B, у разі використання світильників відкритого типу 1-, 2-х лампових, при настінному розміщенні, впродовж 30 хв. роботи, за повторно-короткочасного режиму роботи (довідково)

Технические характеристики

Джерело випромінювання	лампа бактерицидна TUV-30B
Кількість ламп, шт	1
Продуктивність, м3/год	64
Рекомендований об'єм приміщення для I категорії приміщень*, м3, не більше	32
Рекомендований об'єм приміщення для II категорії приміщень*, м3, не більше	48
Рекомендований об'єм приміщення для III категорії приміщень*, м3, не більше	74
Рекомендований об'єм приміщення для IV категорії приміщень*, м3, не більше	122
Середня тривалість ефективної роботи ламп, год, 6000 не менше ніж	
Напруга електроживлення, В	220
Частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт, не більше	50
Габаритні розміри, мм	935x65x65
Маса, кг	1,2