

Коммерческое предложение

06.09.2026

**Облучатель бактерицидный
безозоновый ОББ-15М
настольный**

Артикул: 5866

Старая цена: ~~804.00 грн~~

Новая цена: 564.00 грн



Облучатель бактерицидный настольный ОББ-15М с сертифицированной безозоновой лампой MICROMed TUV-15. Сертификат соответствия UA.056.П.00399-25 выданный Полтавастандартметрология.

Особенно значительна роль дезинфекции воздуха и поверхностей в борьбе с распространением особо опасных инфекций.

Облучатель ozone free бактерицидный настольный ОББ-15М.

Облучатель ОББ-15 бактерицидный переносной на металлической подставке. Предназначен для дезинфекции воздуха и поверхностей жилых и общественных помещений, детских игровых комнат, школьных классов, промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании.

Прочная металлическая подставка делает ОББ-15М более устойчивой, что уменьшает вероятность опрокидывания устройства и повреждения источника ультрафиолетового излучения (кварцевой лампы). Особенностью применения является возможность кварцевания нескольких помещений поочередно.

Является эффективным средством профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным и воздушно-капельным путем.

Облучатель бактерицидный ОББ – это один из видов медицинского оборудования, предназначенных для дезинфекции. При работе облучателя ОББ-15М излучаются коротковолновые лучи ультрафиолетового (UV-C) излучения с длиной волны 253,7 нм,

обладающие бактерицидным действием. При работе облучателя бактерицидного запрещается присутствие людей и животных в помещении без специальных средств защиты.

Облучатель укомплектован БЕЗОЗОНОВОЙ бактерицидной лампой TUV-15B, не выделяющей озона. **Проветривание помещения НЕ ТРЕБУЕТСЯ после работы облучателя с безозоновой лампой.**

Позволяет избежать заражения опасными инфекциями, при нахождении в доме носителя инфекции, в период эпидемий гриппа, ОРЗ, и др.

Облучатель ОББ-15М обеспечивает эффективную дезинфекцию помещения 24 кв.м. Продолжительностью кварцевания 30 мин.

! Кварцевание комнат нужно проводить ежедневно.

Технические характеристики

Источник излучения	лампа бактерицидная TUV-15B
Количество ламп, шт	1
Производительность, м3/ч	32
Рекомендуемый объем помещения, м3, не более	61
Рекомендуемая площадь помещения (выс.2,5м), м2, не более	24
Средняя продолжительность эффективной работы ламп, ч, не менее	6000
Напряжение электропитания, В	220
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Габаритные размеры, мм	515x160x115
Масса, кг	0.9